

Wireless Professional

Electrothérapie professionnelle sans fil



Technologie sans fil : Simplifiez vos séances d'électrothérapie

Découvrez le Wireless Professional, nouvelle référence sur le marché de l'électrothérapie portable professionnelle.

Pensé pour une utilisation optimale en cabinet, il solutionne votre utilisation quotidienne de l'électrothérapie en supprimant toutes contraintes d'utilisation : absence de câbles, plateforme de charge et de rangement professionnelle, démarrage rapide de la séance.

Tout en proposant un large choix de programmes faisant référence en électrothérapie, l'approche innovante et sans fil du Wireless Professional simplifie l'utilisation de la technologie Muscle Intelligence™ tout en facilitant l'intégration de l'électrothérapie dans la rééducation fonctionnelle.



Développé par et pour les professionnels

“ La révolution Wireless Professional s'est bâtie sur une promesse : créer un technologie évolutive répondant aux besoins du praticien. Notre objectif était de proposer un design et une ergonomie adaptés à l'usage professionnel tout en permettant de faciliter l'usage quotidien de l'électrothérapie. Nous vous invitons à découvrir la solution issue du savoir-faire Chattanooga™ ”

David Truffer,
VP Recherche et Développement
DJO Global - Recovery Sciences



Le Wireless Professional vous apporte...

INNOVATION :

En positionnant le confort de stimulation, l'efficacité thérapeutique et la facilité d'utilisation au centre de vos préoccupations, DJO Global est fier de vous apporter sa nouvelle technologie professionnelle sans fil.

Disposant de la technologie brevetée Chattanooga™ Muscle Intelligence™, vous adapterez automatiquement le traitement aux caractéristiques physiologiques de chaque patient et vous personnaliserez vos séances en intégrant facilement l'électrothérapie à chaque étape de la rééducation.



GAIN DE TEMPS :

Un dispositif professionnel intuitif vous apportant une simplicité d'utilisation sans précédent et un gain de temps à chaque séance : facilité de mise en place grâce à la technologie sans fil, démarrage du programme en 3 clics, positionnements d'électrodes directement consultables à l'écran.



LONGEVITE :

Adaptée à l'usage intensif, l'ergonomie de la station guide le remplacement naturel des modules de stimulation après les séances. Les batteries intégrées aux modules en Lithium polymère permettent une charge continue et une autonomie quotidienne de traitement. (charge maximale atteinte en 1h30)

MOBILITE :

Pourquoi choisir entre un dispositif portable ou fixe ? Le Wireless Professional vous apporte le meilleur des deux.

Une station d'accueil facilite le rangement du dispositif en cabinet, les modules simplifient la réalisation des séances au quotidien alors que la sacoche rassemblant modules, télécommande, électrodes et tablette amovible de chargement vous permet une utilisation à tout instant en déplacement.



Une totale liberté de mouvement facilitant la combinaison de l'électrothérapie et des exercices actifs.

La technologie sans fil ainsi que le déclenchement actif par le patient ou choisi par le thérapeute autorisent une grande liberté dans le choix des exercices pouvant accompagner la progression du patient.

Contrôle postural, sollicitation proprioceptive, exercices d'apprentissage moteur ou de reprogrammation neuromotrice peuvent ainsi être aisément associés à la stimulation neuromusculaire.

Depuis le lever de la sidération musculaire post-opératoire jusqu'au travail de la stabilité monopodale en charge ou tout au long du réapprentissage moteur du patient hémiparétique, le Wireless Professional facilite une progression contrôlée et la mise en œuvre d'exercices variés.



Technologie Muscle Intelligence™

mi-technology : Technologie brevetée Chattanooga™ disponible sur chaque module, elle s'intègre naturellement dans vos séances selon 4 fonctions adaptées au choix du programme.

Mi-Scan : Le Sur-Mesure

Personnalisation automatique des paramètres de traitement en stimulation neuromusculaire pour un meilleur confort et plus d'efficacité.

mi-Action : La Volonté

Électrothérapie active par initiation volontaire du patient déclenchant une contraction électro-induite.

mi-Tens : La Précision

Autorégulation du TENS Gate Control en évitant toute activité motrice.

mi-Range : L'Efficacité

Indication du niveau minimum d'énergie nécessaire en basses fréquences pour obtenir une augmentation du débit sanguin local et une production d'endorphine satisfaisante



Le savoir-faire à portée de main

Ressources cliniques intégrées


Photos de positionnement d'électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande. Le stylet point moteur vous invite à déterminer encore plus précisément où positionner l'électrode pour une efficacité optimale.

Applications

Un choix de programmes faisant référence permettant de couvrir toutes les indications de la rééducation, depuis la prise en charge de la douleur et la restauration des qualités musculaires après une immobilisation, jusqu'à des indications plus spécifiques telles que la rééducation neurologique, cardiaque ou vasculaire, la préparation physique et les soins à visée esthétique.

Contrôle de la séance

Télécommande à navigation intuitive pour démarrer une séance en quelques clics. La possibilité pour le praticien de contrôler l'évolution de la séance à distance.

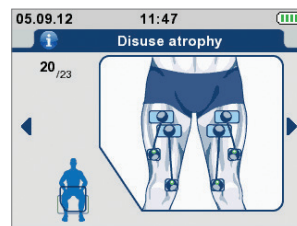

Qualité & Fiabilité

Deux fondamentaux de la solution Wireless Professional.

Ergonomie et protection :

Télécommande adaptée à l'utilisation intensive et quotidienne : clavier siliciné évitant la pénétration de crème de massage, navigation intuitive, housse de protection antichoc. Une garantie de 2 ans sur les modules, la télécommande et la station d'accueil.

Technologie Suisse :

Les produits du groupe DJO Global sont issus du savoir-faire de l'équipe R&D basée à Ecublens, Suisse.

Reconnue pour son esprit pionnier, elle vous propose des solutions thérapeutiques à la pointe de l'innovation intégrant les technologies brevetées sans fil ou encore Muscle Intelligence™.

Confiance partagée :

Nos dispositifs sont systématiquement validés par nos utilisateurs lors de leur phase de développement. Travailler selon vos souhaits en s'accordant à l'évolution de votre pratique nous permet de vous offrir des dispositifs répondant à vos exigences d'ergonomie et de performance.



Sécurité

Comment vous proposer la meilleure solution adaptée à vos besoins ? Optimiser les résultats thérapeutiques - Sécuriser la séance - Améliorer la facilité d'utilisation de vos dispositifs - Gagner du temps dans la mise en place du traitement. Notre but est de révolutionner votre pratique en vous proposant une nouvelle vision des outils accompagnant vos séances.

IMPULSION OPTIMALE

Le choix du courant est primordial pour s'assurer d'une séance sécurisée, confortable et efficace. Wireless Professional propose le courant optimal dont voici les caractéristiques :

1. Générateur de courant constant
2. Rampe verticale pour une installation instantanée du courant
3. Forme rectangulaire à plateau constant
4. Durée d'impulsion égale à la chronaxie pour minimiser la quantité d'énergie imposée et améliorer le confort de stimulation
5. Courant 100% compensé évitant toute polarisation du tissu et tout risque de brûlure. Application possible même en présence de matériel implanté.

+ TENS : De nombreuses situations cliniques nécessitent de combiner les effets thérapeutiques du TENS à tout autre traitement. Le Wireless Professional vous invite à associer deux programmes simultanément afin d'optimiser les bénéfices de la séance.

Autonomie : Batteries Lithium directement rechargeables sur secteur à l'aide de la station de charge amovible.

En utilisant le Wireless Professional, vos patients profiteront d'une totale liberté de mouvement et d'un dispositif sécurisé et performant favorisant le confort et l'efficacité des séances.

DJO GLOBAL

AUSTRALIA:

T: +1300 66 77 30
F: +1300 66 77 40
E: service@djortho.com.au

BENELUX:

T: Belgium 0800 18 246
T: Netherlands 0800 0229442
T: Luxemburg 8002 27 42
E: benelux.orders@DJOglobal.com

CANADA:

T: +1 866 866 5031
F: +1 866 866 5032
E: canada.orders@DJOglobal.com

CHINA:

T: (8621) 6031 9989
F: (8621) 6031 9709
E: information_china@DJOglobal.com

DENMARK, FINLAND,

NORWAY & SWEDEN:
T: Sweden 040 39 40 00
T: Norway 8006 1052
T: Finland 0800 114 582
T: Denmark +46 40 39 40 00
E: info.nordic@DJOglobal.com

FRANCE:

T: +33 (0)5 59 52 86 90
F: +33 (0)5 59 52 86 91
E: scc.ial@DJOglobal.com

GERMANY:

T: +49 761 4566 01
F: +49 761 456655 01
E: infoservice@DJOglobal.com

ITALY:

T: +39 02 484 63386
F: +39 02 484 09217
E: it.info@DJOglobal.com

INDIA:

T: +91 44 66915127
E: customercare.india@DJOglobal.com

SOUTH AFRICA:

T: +27 (0) 87 3102480
F: +27 (0) 86 6098891
E: info.southafrica@DJOglobal.com

SPAIN:

T: +34 943 638 167
F: +34 943 638 174
E: svc.cial@DJOglobal.com

SWITZERLAND:

T: +41 (0) 21 695 2360
F: +41 (0) 21 695 2361
E: info@compex.ch

UK & IRELAND:

T: +44 (0)1483 459 659
F: +44 (0)1483 459 470
E: ukorders@DJOglobal.com

UNITED STATES:

T: +1 800 336 6569
F: +1 800 936 6569
E: customercare@DJOglobal.com

DJO GLOBAL, EXPORT CENTERS

ASIA-PACIFIC:

T: +852 3105 2237
F: +852 3105 1444
E: info.asia@DJOglobal.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA:

T: +32 (0) 14248350
F: +32 (0) 14248358
E: info.emea@DJOglobal.com

LATIN AMERICA:

T: +1 800 336 6569
F: +1 800 936 6569
E: info.latam@DJOglobal.com

www.DJOglobal.eu

DISTRIBUÉ PAR



190, Boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | **T** 800 361.0877
F 450 669.9532 | **T** 888 935.7001
www.medicaltronik.ca



Together in Motion™